

C3+ Holter Monitor

Patienten Information



**Liebe Patientin, lieber Patient,
Sie starten heute mit einer
ambulanten EKG-Untersuchung.**

Mit dem kleinen und leichten C3+ Holter Monitor können Sie Ihren täglichen Aufgaben nachgehen. Das EKG-Gerät ist so konzipiert, dass es für Sie so bequem und komfortabel wie möglich ist.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte grundsätzlich an Ihren behandelnden Arzt oder Ärztin. Bitte beachten Sie folgende Hinweise während der Tragedauer des LZ EKG Gerätes, nur so können bestmögliche Ergebnisse und damit


Die Aufzeichnung läuft für _____ Tage.

Bitte bringen Sie das Gerät am _____ zurück.

ein aussagekräftiges LZ EKG erzielt werden. Sollten sich die Elektroden ablösen, wenden Sie sich bitte sofort ebenfalls an Ihren behandelnden Arzt.

Herzrhythmusstörungen haben viele Ursachen. Sie lassen sich oft durch das Fühlen des Pulses oder das Abhören des Herzens feststellen, jedoch sind

häufig weiterführende Untersuchungen für eine genaue Diagnose notwendig. Mit einem Elektrokardiogramm (EKG) werden die Herzschläge aufgezeichnet. In Ihrem Fall werden diese mittels eines Langzeit-EKGs (LZ-EKG) über 24 Stunden oder länger aufgezeichnet. Der C3+ Holter kann nur von medizinischem Fachpersonal abgenommen werden.

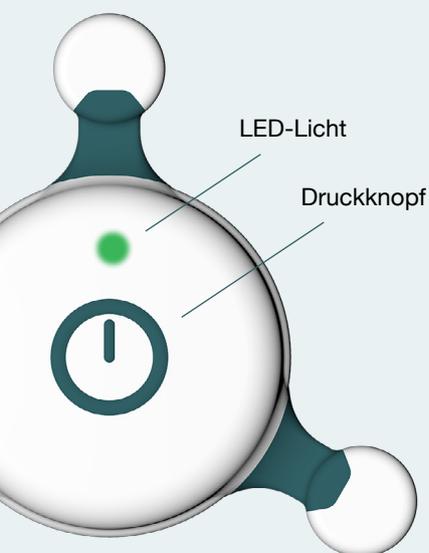

Grün

Blinkt langsam: Aufzeichnung läuft.
Blinkt schnell: Ereignis markiert.

Gelb

Blinkt langsam: Speicher ist voll.
Blinkt schnell: Batterie ist schwach / schaltet aus.

Weiß

Blinkt schnell: Kein Signal, Elektroden haben keinen richtigen Kontakt zum Körper.
Blinkt konstant: Bitte kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt.



Halten Sie sich nicht in der Nähe elektromagnetischer Felder.



Benutzen Sie keine Sauna / Infrarotkabinen.



Duschen Sie nicht mit dem Gerät.



Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.

